



保水性に優れ
表面で滑りにくい
ウェットマット

ク-デック
ウェットマット[®]

防塵吸着・除菌マット

WETMAT

水分(水道水)を散布するだけで塵芥を吸着し、除菌能力を発揮します。

保水性能が格段に向上しました。一回の散水で長く湿潤状態を持続し、除塵、吸着能力を発揮します。

湿潤マット表面で、滑りにくい凹凸パターンを採用しました。




ほとんど段差がありません

使用場所に あわせて自在に 組み合わせ可能。

■ ウェットマットと水取りマットの組み合わせ使用例

床面に設置した、ウェットマットは通過方向の中央を「ウェット」、その前後を「水取り」とし、履物や車輪の水分をふき取るようにします。散水は「ウェット」のみに行います。

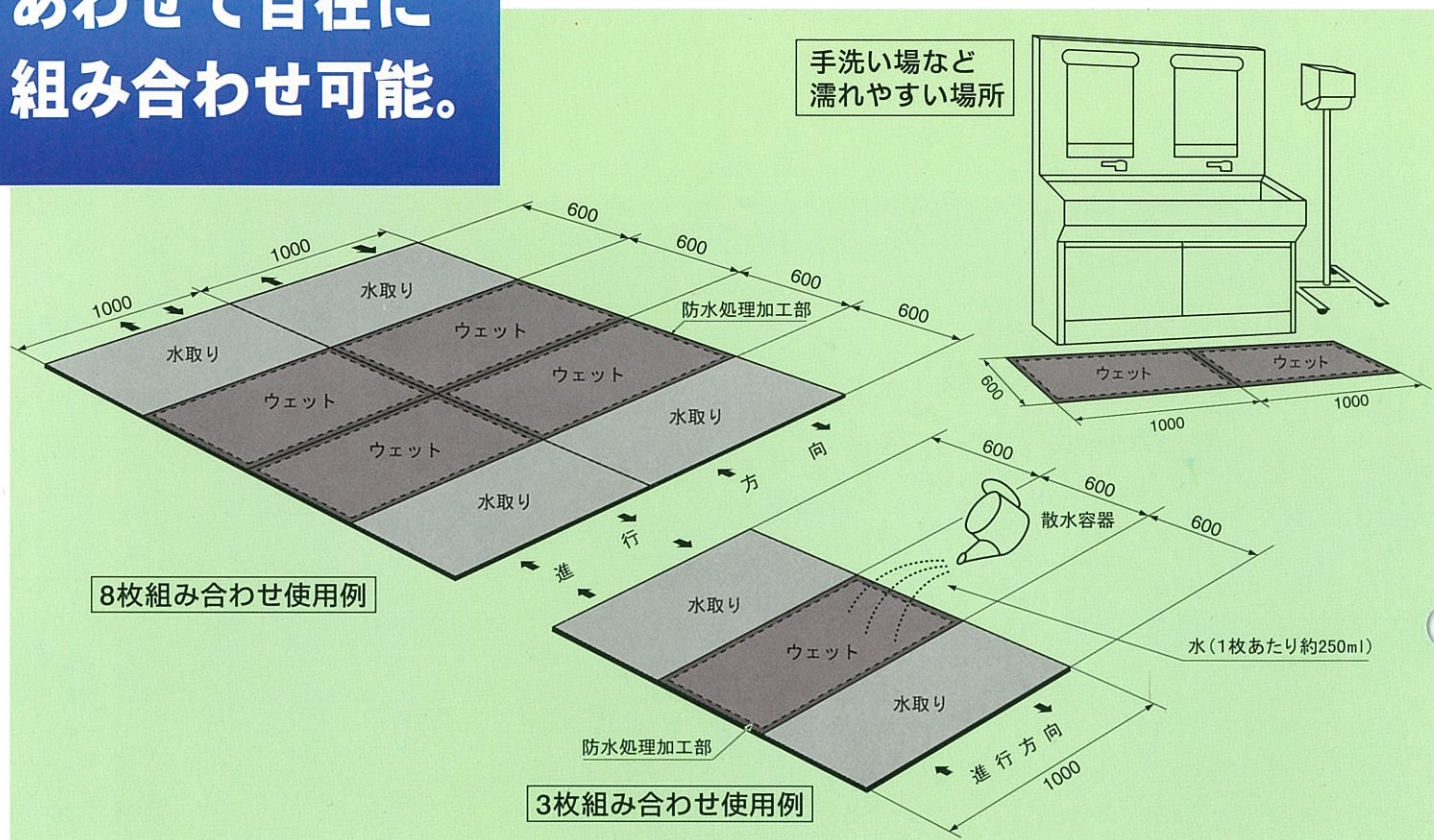

設置は簡単。1週間連続使用。

■ ウェットマットの使用方法

1. ウェットマット裏面の剥離紙をはがし、床面に設置します。
2. 「ウェット」部分に、1,000×600サイズで約250ml、500×600サイズで110mlを目安としてまんべんなく散水して下さい。乾燥してきましたら水を追加して下さい。水分が多すぎると滑りやすくなり危険です。
3. 使用期間や散水量は使用場所、通行量など、使用状況により異なります。(詳しくは弊社営業にお尋ねください。)

■ ウェットマット取扱い上のご注意

1. 素足や素手でマットに触れた時は水でよく洗い流してください。目に入らないよう十分注意し、誤って入った場合は多量の水で洗い流したのち、専門医の処置を受けてください。
2. すべり易いので、傾斜のある場所や、走ったりする場所には使用しないでください。
3. 「ウェットマット」に定められた量以上の水を撒かないでください。保湿状態で十分な効果があります。
4. 「水取り」を必ず使用し、履物裏の水分は「水取り」上で(足踏みなどをして)ふき取ってください。
5. 「水取り」には水は撒かないでください。
6. 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
7. 手荒れ防止の為、取扱時には、必ず手袋を着用してください。

■ ウェットマットの規格

製品番号	品名	寸法	ケース入数
MW10060A	ウェット	1,000×600	30枚(10枚入×3袋)
MW10060W	水取り	1,000×600	30枚(10枚入×3袋)
MW5060A	ウェット	500×600	30枚(10枚入×3袋)
MW5060W	水取り	500×600	30枚(10枚入×3袋)

※薬剤(アルカリ、第四級アンモニウム塩)含浸済
※マット底面およびウェットの全周辺部防水加工済 ※マット底面粘着加工済

▲ ウェットマットの水分が履物裏に残りますと滑ることがあり危険です。設置の際には注意表示するなどご注意ください。

製造販売業者



大研医器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒540-0045 大阪市中央区道修町3-6-1 京阪神不動産ビル14F TEL 06-6231-9901

＜製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください。＞

仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561

東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011

横浜支店 〒231-0063 横浜市中区花咲町2-66 千葉ビル5F TEL 045-260-0521

名古屋支店 〒464-0067 名古屋市中区千種区池下1-8-16 マエダ池下ビル3F TEL 052-759-3051

大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161

広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 栄泉福荷町ビル2F TEL 082-568-2377

福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751

札幌営業所 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060

COOPDECHの製品情報はホームページをご覧ください → <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店

ウェットマット・水取りマット価格表

品名	製品番号	サイズ(mm)	ケース入数	定価
ウェットマット	MW10060A	1,000×600	30枚(10枚×3袋)	90,000円
	MW5060A	500×600	30枚(10枚×3袋)	60,000円
水取りマット	MW10060W	1,000×600	30枚(10枚×3袋)	60,000円
	MW5060W	500×600	30枚(10枚×3袋)	45,000円
専用フレーム	ST-F1060W	1,165×765	1枚(1枚敷用) 滑り止め用	17,500円
	ST-F5060W	665×765	1枚(1枚敷用) 滑り止め用	14,000円

※上記記載価格に消費税は含んでおりません。

大研医器株式会社

〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6
TEL:06-6943-1161 FAX:06-6943-1162