



クーデック[®]ダブルルーメン気管支チューブ 「フランジ」使用方法

フランジを使用するとチューブの固定、固定解除がワンタッチで行えます。


- 1** チューブを挿管し、フランジのスリットを開きチューブに取り付けます。

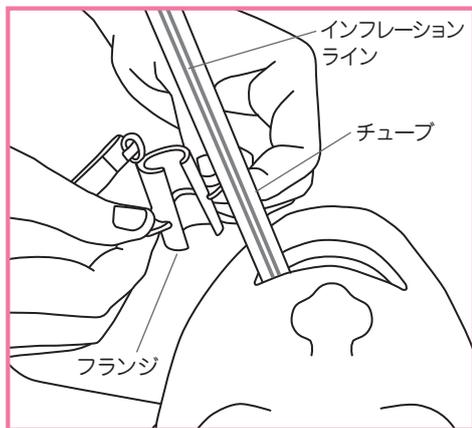


- 2** クランプのマーク（ピンク）とフランジのつばの「頭」の文字を上顎歯側にします。

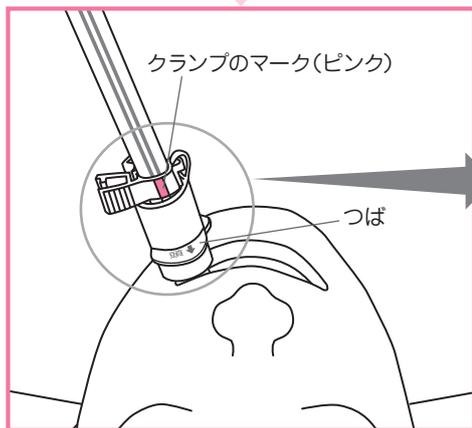

- 3** フランジのつばを口腔前庭に入れます。

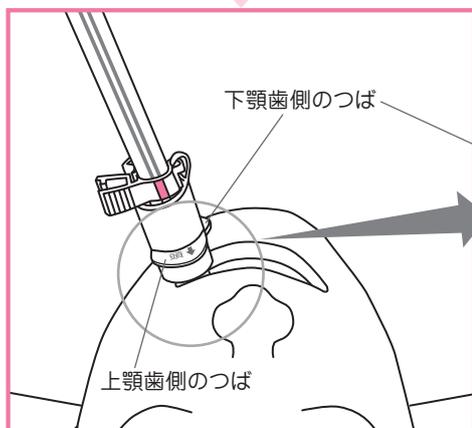


- 4** フランジの楕円形状とチューブの楕円形状を合わせ、フランジをサージカルテープなどで固定します。

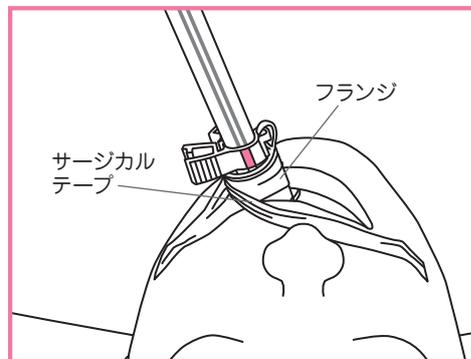


- 5** チューブの楕円をつぶさないようにインフレーションラインにクランプのマーク（ピンク）を合わせ、「カチッ」と鳴るまでクランプをつまみチューブを固定します。

△注意 ●正しく固定できていない場合、チューブの内腔が狭まるおそれがあります。
●白色のX線透過ラインにクランプのマーク（ピンク）を合わせると、チューブの内腔が狭まります。

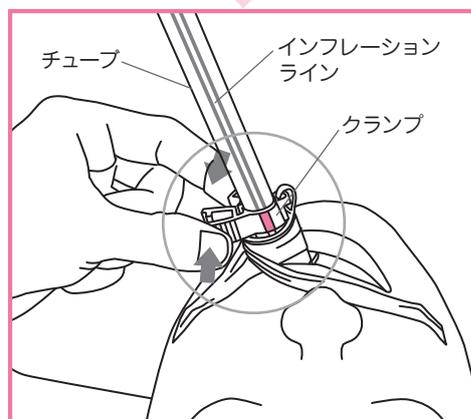

- 6** チューブの固定を解除するときは、クランプの図の位置をつまみます。

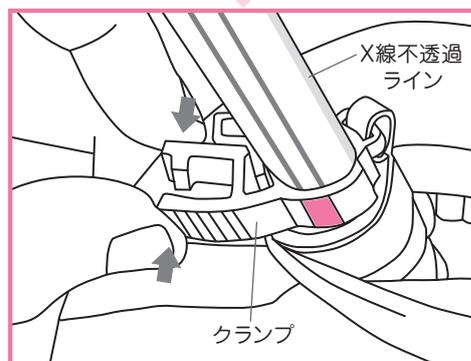

- フランジを使用するときは、定期的に口腔や口唇等の状態を確認してください。異常を確認した場合は、フランジの固定位置を変える、使用を中止するなどの適切な処置を行ってください【口腔や口唇等の損傷や出血、歯の損傷のおそれがあります】。
- チューブの挿入調整を行うときは、フランジが動かないように手で保持してください。

製造販売業者

 **大研医療株式会社**
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

必ず添付文書をよく読んでご使用ください。

2008B <社内管理番号：05204503-J04>