

気泡警報が解除されない時の対応方法


プライミングを行っても気泡警報状態が解除されない場合は、以下の手順を行ってください。

1. ドライブユニットからエイミーMP ユニットを取り外します。
2. エイミーMP ユニット上流側チューブ（下図で黄色く示す部分）を指ではじいて、気泡をチューブ先端に移動させます。

<気泡を検出している状態>



<気泡がチューブ先端へ移動した状態>

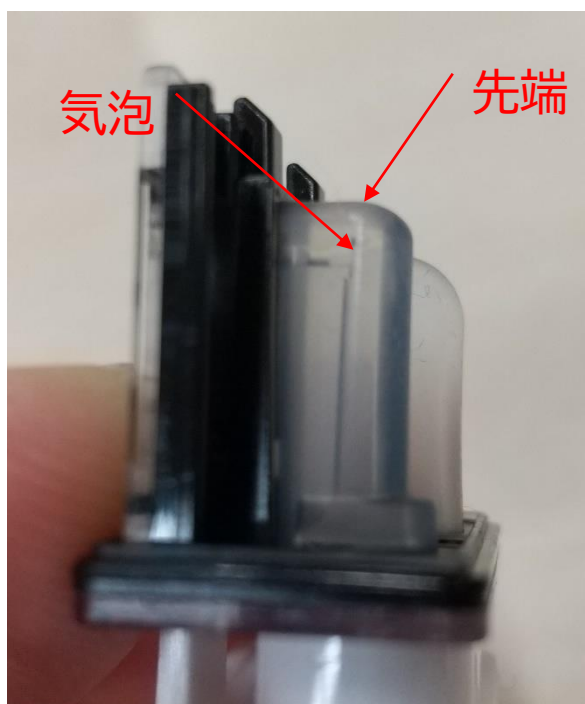

3. ドライブユニットにエイミーMP ユニートを挿入し、[リリース]スイッチをロックします。
4. プライミングを行い、気泡警報が解除されることを確認してください。