



バンパーの交換方法

1. ドライブユニットを表に向け、突起のはまり込みを外します。

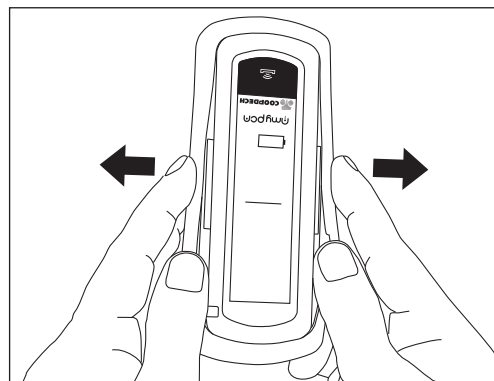


2. 開口のある側からバンパーを広げて、下側にずらします。

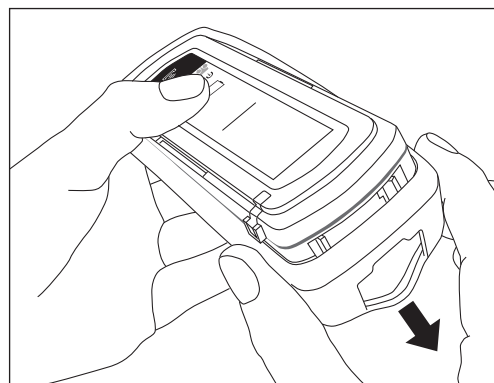


3. ドライブユニットを上側に大きく引き出します。

4. バンパーからドライブユニットを斜めに取り外します。

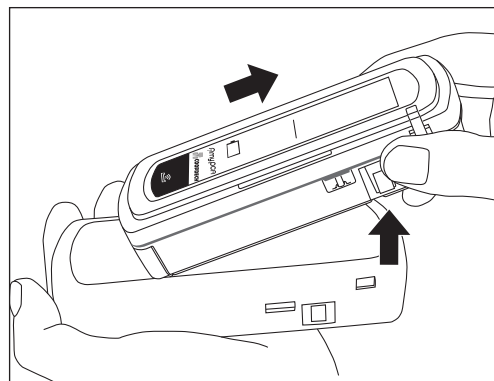


5. 新しいバンパーを用意します。ドライブユニットの下側からバンパーに挿入します。

6. バンパーを広げながら、ドライブユニットの上側を押し込みます。

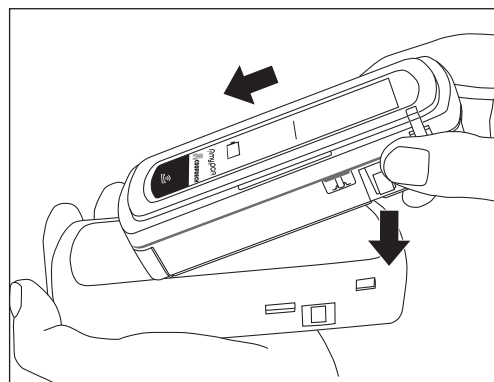


バンパーの交換方法


7.バンパーの開口部を広げて、ドライブユニットに被せます。

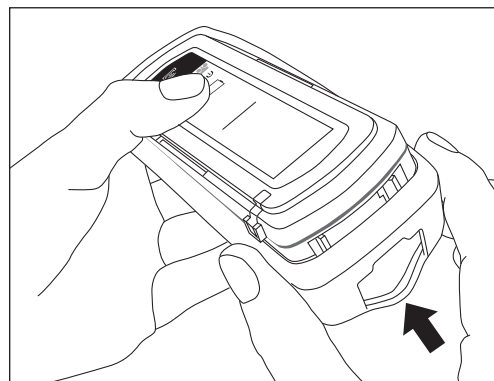

8.ドライブユニット表側の突起をはめ込みます。

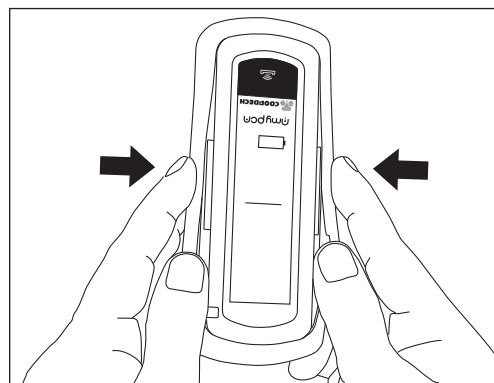


9.ドライブユニット裏側の突起をはめ込みます。

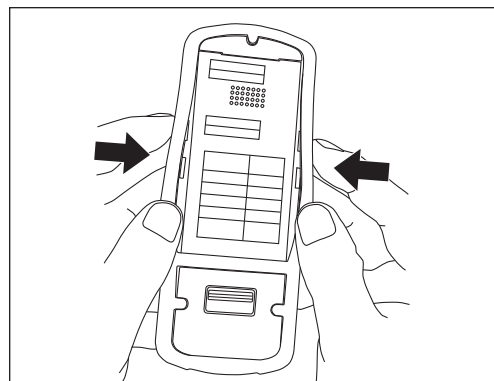

10.バンパーの浮き上がりが無いことを確認してください。

⚠ 注意

- 浮き上がりなどがあり適切にバンパーが取り付けられていない場合、耐衝撃、防水性等の性能が低下するおそれがあります。

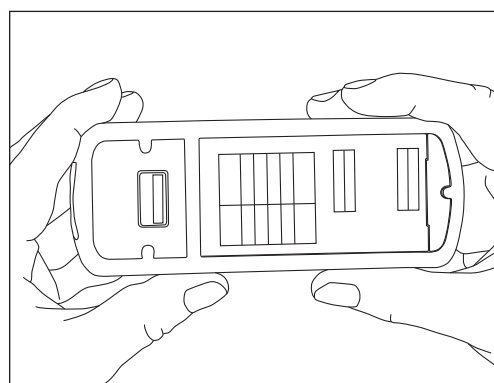

以上でバンパーの交換は完了です。

部品名	品番
バンパー	APS-105

製造販売業者

 **大研医器株式会社**

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

2502B <社内管理番号: 08604564-J01>